

INSTRUCCIONES MASCARILLA PARA PARTÍCULAS 9332 3M




INSTRUCCIONES

MASCARILLA PARA PARTÍCULAS 9332 3M PROTECCIÓN FFP3 (MASCARILLA PLEGADA)

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

1. El clip para la nariz está situado en el panel superior. Déle forma previa doblándolo suavemente por el centro. Sujete la mascarilla con la mano y tire del extremo del doblado inferior para abrirlo.
2. Déle la vuelta a la mascarilla para dejar al descubierto las bandas de la cabeza.
3. Coloque la mascarilla debajo de la barbilla. Asegúrese de que las bandas están separadas y páselas por encima de la cabeza una después de otra.
4. Ponga la banda inferior por debajo de las orejas y la superior por la coronilla. Ajuste los bordes superior e inferior para mayor comodidad.
5. Con las dos manos, moldee el clip nasal para que se ajuste a la forma de su nariz. Moldee la zona de la nariz, apretando la pieza metálica por ambos lados a la vez. Precaución: Si solo utiliza una mano para moldear la pieza, el ajuste puede no ser correcto y por tanto, la mascarilla perderá eficacia.
6. El ajuste facial debe comprobarse antes de entrar en la zona de trabajo.

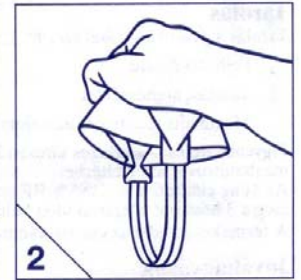

Para comprobar el ajuste de una mascarilla sin válvula:

- a) Cubrir la parte frontal de la mascarilla con las dos manos, cuidando no modificar la posición de la misma.
- b) Exhalar con fuerza. Si el aire fluye alrededor de la nariz, reajustar el clip nasal como se describe en el punto 5. Si se notan fugas de aire en los extremos de la mascarilla, reajustar las bandas de sujeción. Si **NO PUEDE** conseguir un ajuste perfecto **NO ENTRE** en la zona contaminada y hable con su supervisor.

Para comprobar el ajuste de una mascarilla con válvula:

- a) Cubrir la parte frontal de la mascarilla con las dos manos, cuidando no modificar la posición de la misma.
- b) Inhalar con fuerza. Si el aire fluye alrededor de la nariz, reajustar el clip nasal como se describe en el punto 5. Si se notan fugas de aire en los extremos de la mascarilla, reajustar las bandas de sujeción. Si **NO PUEDE** conseguir un ajuste perfecto **NO ENTRE** en la zona contaminada y hable con su supervisor.

NOTA:

No utilizar si tiene barba o patillas demasiado grandes puesto que podrían impedir el contacto entre el rostro y los bordes de la mascarilla. Si no puede conseguir el ajuste correcto, no entre en el área contaminada. Consulte con su supervisor.

ADVERTENCIAS:

1. Igual que con cualquier otro equipo de protección respiratoria, el usuario debe ser formado en el uso correcto del mismo.
2. Esta mascarilla no protege al usuario frente a gases, vapores o disolventes de pintura en spray y no debe utilizarse en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno (valor estimado por 3M).
3. Utilícese exclusivamente en áreas adecuadamente ventiladas y que contengan suficiente oxígeno.
4. No debe utilizarse cuando las concentraciones de los contaminantes sean inmediatamente peligrosas para la salud o la vida.
5. Abandone el área contaminada inmediatamente si:
 - a) la respiración se hace dificultosa
 - b) siente vértigos, mareos u otro malestar
6. Reemplace la mascarilla si ésta ha sufrido algún daño, cuando la resistencia a la respiración se haga excesiva o al finalizar cada turno.
7. Nunca altere, modifique o repare este producto.
8. Si no se siguen cuidadosamente estas instrucciones y advertencias al utilizar la mascarilla, la eficacia de la misma disminuirá y podrá resultar en enfermedad o incapacidad permanente.

ALMACENAJE

Almacenar de acuerdo con las instrucciones del fabricante

Caducidad

Rango de temperatura de almacenamiento

Máxima humedad relativa

Nota: Las condiciones de almacenamiento pueden superar una media de 25°C / 80% H.R. en periodos de tiempo limitados.

Se puede alcanzar una media de 38°C /85% H.R. siempre que esto suceda durante un máximo de 3 meses del periodo de vida útil.

Cuando se transporte este producto use su embalaje original.

CERTIFICACION

Este producto cumple con requisitos básicos de seguridad según el artículo 10 y 11B de la Directiva Europea 89/686/CEE (en España R.D. 1407/1992), lleva por tanto marcado CE.

Estos productos han sido examinados en su etapa de diseño por el siguiente organismo: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ, Inglaterra (Número de Organismo Notificado 0086)

ESTAS INSTRUCCIONES HAN SIDO EXTRAÍDAS por la Unidad de Prevención de Riesgos de la Universidad de Zaragoza DEL FOLLETO QUE DISTRIBUYE EL FABRICANTE CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN utilizando los datos proporcionados por el mismo, no siendo responsabilidad del fabricante 3M cualquier error en su redacción.

3M España, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena 19-25, 28027 Madrid. Tel.: 91 3216143 – www.3m.com/es/seguridad